

AOSEPT® PLUS CE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU UŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTU. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ. INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ, ABY W RAZIE POTRZEBY MÓC JĄ PONOWNIE PRZECZYTAĆ.

System pielęgnacyjny AOSEPT® PLUS przeznaczony jest do czyszczenia, dezynfekcji, neutralizacji, usuwania osadów białkowych i przechowywania wszystkich rodzajów soczewek kontaktowych, w tym również soczewek silikonowo-hydrożelowych. System AOSEPT® PLUS zawiera płyn czyszczący i dezynfekujący AOSEPT PLUS (Rys. 1.) oraz pojemnik na soczewki AOSEPT PLUS (Rys. 2.). Opakowanie do przechowywania soczewek AOSEPT PLUS składa się z przezroczystego pojemnika z nakrętką, koszyczka na soczewki oraz z umieszczonego pod nim katalizatora neutralizującego AODISC™. Ponieważ AODISC odgrywa zasadniczą rolę w procesie neutralizacji nadtlenu wodoru, przed użyciem należy upewnić się, że do pojemnika dołączono dysk katalityczny AODISC. Płyn AOSEPT PLUS oraz pojemnik na soczewki AOSEPT PLUS muszą być zawsze stosowane razem. Wolny od konserwantów wodny roztwór AOSEPT PLUS zawiera: 3% nadtlenu wodoru, kwas fosfoniowy (stabilizator), chlorek sodowy, fosforan (system buforujący) i poloxamer (surfaktant).



Produkt wytwarzany w warunkach aseptycznych.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Umyj ręce i osusz je czystym ręcznikiem.
2. Otwórz pojemnik na soczewki i umieść lewą soczewkę kontaktową w koszyczku w części oznaczonej literą „L”, następnie ostrożnie zamknij koszyczek tak, aby nie uszkodzić soczewki.
3. Powtórz procedurę umieszczając prawą soczewkę kontaktową w koszyczku w części oznaczonej literą „R”.
4. Otwórz zatyczkę na nakrętce zabezpieczającą butelkę z płynem AOSEPT PLUS, odchylając go tak, aby płyn mógł swobodnie wydostawać się na zewnątrz.
5. Soczewki umieszczone w koszyczku pojemnika spłukuj obficie płynem AOSEPT PLUS przez 5 sekund (Rys. 3.).

6. Napełnij pojemnik płynem AOSEPT PLUS do poziomu linii. **NIE NAPEŁNIAJ POJEMNIKA ANI POWYŻEJ, ANI PONIŻEJ POZIOMU LINII** (Rys. 4.).
7. Umieść koszyczek z soczewkami w pojemniku napełnionym płynem i dokładnie zakręć pojemnik (Rys. 5.). Nie potrząsaj pojemnikiem.
8. Pojemnik przechowuj w pozycji pionowej (Rys. 5.).

– Jeśli z otworu na szczycie pojemnika na soczewki wydobywają się bąbelki, może to świadczyć o tym, że z pojemnika wydostają się nieznutralizowane cząstki płynu AOSEPT PLUS. W takim przypadku należy otworzyć pojemnik, wylać z niego płyn AOSEPT PLUS i zmyć ewentualne jego resztki z powierzchni, na której stał pojemnik. Pojemnik oraz koszyczek na soczewki należy dokładnie opłukać sterylną solą fizjologiczną. W razie rozlania płynu AOSEPT PLUS, należy natychmiast usunąć jego pozostałości za pomocą papierowego ręcznika. Przed kontaktem z soczewkami lub z okiem należy dokładnie umyć ręce. **NASTĘPNIE NALEŻY POWTÓRZYĆ CAŁĄ PROCEDURĘ DEZYNFEKCJI OD POCZĄTKU.**

9. Soczewki pozostaw w pojemniku przez co najmniej 6 godzin (Rys. 6.) lub przez całą noc w celu ich neutralizacji.
10. Wyjmij soczewki z koszyczka.
11. Soczewki są gotowe do założenia.
12. Wylej płyn z pojemnika do przechowywania soczewek, następnie przepłucz pojemnik oraz koszyczek AOSEPT PLUS sterylną solą fizjologiczną. **DO PŁUKANIA NIE UŻYWAJ WODY Z KRANU ANI INNEJ WODY NIESTERYLNEJ.**
13. Wyjmij koszyczek z pojemnika i pozostaw oba elementy osobno do wyschnięcia (Rys. 7).
14. Po dezynfekcji/neutralizacji soczewki można przechowywać w zneutralizowanym roztworze AOSEPT PLUS w nieotwieranym pojemniku AOSEPT PLUS do 14 dni. Soczewki należy dezynfekować i neutralizować z wykorzystaniem świeżego płynu przed każdym ich użyciem lub co 14 dni, gdy soczewki nie są używane.

Jeśli specjalista tak zaleci, to:

– przed założeniem soczewek przepłukać je sterylną solą fizjologiczną.

PRZECIWWSKAZANIA (Powody, aby nie stosować):

- Uczulenie na którykolwiek składnik preparatu.
- Nie wolno stosować płynu AOSEPT PLUS do dezynfekcji termicznej.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:



- Nie stosuj po upływie terminu przydatności.
- Przed pierwszym użyciem sprawdź czy banderola na butelce jest nienaruszona.

Jeśli jest przerwana, nie używaj.

- Zakręcaj butelkę po każdym użyciu.
- Nie stosuj po upływie trzech miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.
- Nie dopuszczaj do kontaktu końcówki butelki z jakąkolwiek powierzchnią, ponieważ może to skutkować zanieczyszczeniem płynu.
- Zawsze stosuj nowy pojemnik z koszyczkiem AOSEPT PLUS dołączany do każdej butelki płynu AOSEPT PLUS.
- Przechowuj w temperaturze poniżej 25°C.
- Zawsze stosuj w otoczeniu o temperaturze od 15 do 25°C. W temperaturze poniżej 15°C proces neutralizacji może trwać dłużej niż 6 godzin.
- Przechowuj z dala od bezpośredniego źródła światła lub ciepła.
- Przed zmianą systemu do pielęgnacji soczewek kontaktowych skonsultuj się ze specjalistą.

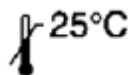

OSTRZEŻENIA:

- NIGDY NIE TRZYMAJ SOCZEWEK W RĘKU PODCZAS CZYSZCZENIA LUB PŁUKANIA ICH PŁYNEM AOSEPT PLUS.
- NIGDY NIE UŻYWAJ INNYCH PŁYNÓW CZYSZCZĄCYCH, PONIEWAŻ ICH POZOSTAŁOŚCI POWODUJĄ POWSTAWANIE PIANY, CO SKUTKUJE PRZEPEŁNIENIEM POJEMNIKA I WYLEWANIEM SIĘ PŁYNU NA ZEWNĄTRZ.
- **Czerwona nakrętka oznacza: Nie wolno wkraplać nieneutralizowanego płynu AOSEPT® PLUS bezpośrednio do oka.**



- **SOCZEWKI KONTAKTOWE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ WYŁĄCZNIE W POJEMNIKU AOSEPT PLUS DOŁĄCZONYM DO KAŻDEGO OPAKOWANIA PŁYNU AOSEPT PLUS. NIE WOLNO STOSOWAĆ ŻADNYCH INNYCH POJEMNIKÓW NA SOCZEWKI.**
- **Przed użyciem soczewek zawsze należy upewnić się, że zostały one właściwie zneutralizowane. NIEZNEUTRALIZOWANY PŁYN AOSEPT PLUS JEST WYSOCE SKUTECZNYM ŚRODKIEM DEZYNFEKUJĄCYM, który w kontakcie z okiem POWODUJE UCZUCIE PIECZENIA. Jeśli przypadkowo została użyta nieneutralizowana soczewka, należy ją natychmiast wyjąć z oka i opłukać w dużej ilości sterylnej wody lub soli fizjologicznej. Przed założeniem soczewki należy ponownie ją zdezynfekować.**
- Stosuj wyłącznie świeży płyn AOSEPT PLUS – nigdy nie używaj płynu dwukrotnie, ponieważ nie będzie już skuteczny.
- NIGDY nie przelewaj płynu AOSEPT PLUS do innego pojemnika.
- NIGDY nie rozcieńczaj płynu AOSEPT PLUS innymi roztworami ani nie mieszaj go z nimi, ponieważ może to spowodować utratę jego właściwości.

- NIE WOLNO DOPUŚCIĆ DO KONTAKTU SOCZEWKI Z NIESTERYLNYMI PŁYNAMI (W TYM Z WODĄ Z KRANU LUB ZE ŚLINĄ), PONIEWAŻ ZANIECZYSZCZENIA MIKROBIOLOGICZNE MOGĄ SKUTKOWAĆ TRWAŁYM USZKODZENIEM WZROKU.

- PRZECHOWUJ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

- W przypadku połknięcia niezneutralizowanego płynu AOSEPT PLUS należy natychmiast wypić dużą ilość wody i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

- Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek środków leczniczych w trakcie stosowania soczewek kontaktowych należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub z lekarzem okulistą.

REAKCJE NIEPOŻĄDANE

W przypadku wystąpienia uporczywego dyskomfortu lub podrażnienia należy wyjąć soczewki z oczu, przerwać ich stosowanie i skontaktować się ze specjalistą.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Płyn AOSEPT PLUS, sterylizowany metodą filtracji, dostępny jest w butelkach o pojemności od 120 ml do 360 ml. Pojemnik na soczewki wraz z dyskiem katalitycznym AODISC jest dołączony do każdego opakowania.



Wytwórca:

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA

CE 0123



Autoryzowany Przedstawiciel w Unii Europejskiej

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR,
United Kingdom

Dystrybutor:

Alcon Polska Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Data opracowania: 18.10.2013

© 2014 Novartis