

OPTI-FREE® EXPRESS® Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny
BEZ POCIERANIA DŁUGOTRWAŁY KOMFORT
Tekst ulotki informacyjnej (PACKAGE INSERT)

Prosimy o uważne przeczytanie i pozostawienie poniższej ulotki.

OPIS:

OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS (Multi-Purpose Disinfecting Solution = wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny) zawiera POLYQUAD® i ALDOX®, składniki które niszczą szkodliwe mikroorganizmy, ale są niegroźne dla oczu. Zawiera również cytryniany, które usuwają osady białkowe podczas przechowywania soczewek.

OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS zapewnia długotrwały komfort noszenia soczewek, również dla oczu wrażliwych.

OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS nawilża soczewki, łagodząc drobne podrażnienia i dyskomfort mogący pojawić się w trakcie ich noszenia. W trakcie używania **OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS** nie jest wymagane stosowanie roztworu soli fizjologicznej.

OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS jest wskazany do dezynfekcji, czyszczenia, spłukiwania, nawilżania i przechowywania wszystkich miękkich soczewek kontaktowych, włącznie z soczewkami silikonowo-hydrożelowymi.

SKŁAD:

OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS jałowy, zbuforowany, izotoniczny wodny roztwór zawierający chlorek sodu, sorbitol, sól sodową EDTA, kwas borny, aminoetylopropanol; cytryniany i TETRONIC®* 1304 jako składniki czyszczące; POLYQAD® (chlorek polidronium) 0,001% oraz ALDOX® (miristoamidopropylodimetyloamina) 0,0005%.

* TETRONIC jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez BASF

PRZECIWWSKAZANIA (Kiedy nie używać):

Pacjenci uczuleni na jakikolwiek ze składników **OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS** nie powinni używać preparatu.

No Rub Comfort Labeling
Insert, Carton, Bottle

Page 1 of 4
Updated: July 17, 2006
GSF06-1367

WSKAZÓWKI OGÓLNE:

- Przed dotykaniem soczewek zawsze należy umyć i opłukać ręce. Soczewki (lewą i prawą) należy nakładać i zdejmować zawsze w tej samej kolejności w celu uniknięcia ich zamiany.
- Przed użyciem nowego pojemnika ALCON® na soczewki należy go starannie wypłukać **OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS**.
- Pozostały po dezynfekcji płyn należy wylać, a pojemnik przepłukać **OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS** i wysuszyć. Firma Alcon zaleca systematyczną wymianę pojemników na nowe.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA, DEZYNFEKCJI I USUWANIA OSADÓW BIAŁKOWYCH:

Spłukać dokładnie **OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS** każdą stronę soczewki. Napełnić pojemniczek ALCON® odpowiednią ilością świeżego płynu pokrywającą całkowicie soczewki. Pozostawić soczewki w zamkniętym pojemniku na noc lub na minimum 6 godzin. Przed założeniem soczewek należy każdą ich stronę opłukać w celu usunięcia jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Okulista może zalecić stosowanie dodatkowych produktów lub dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych w zależności od składu filmu łzowego czy sposobu noszenia soczewek. Zawsze należy zastosować się do wskazań okulisty.

Soczewki można przechowywać w zamkniętym pojemniku maksymalnie do 30 dni. Jeżeli soczewki są przechowywane przez okres dłuższy niż 30 dni, przed założeniem należy je ponownie umyć i zdezynfekować świeżym płynem.

NAWILŻANIE:

Jeżeli w trakcie noszenia soczewek kontaktowych wystąpi łagodne podrażnienie, dyskomfort lub niewyraźne widzenie, należy podać 1 lub 2 krople **OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS** do oka a następnie dwu-trzykrotnie mrugnąć okiem. Płyn można stosować tak często jak wymaga tego potrzeba.

OSTRZEŻENIA:

No Rub Comfort Labeling
Insert, Carton, Bottle

Page 2 of 4
Updated: July 17, 2006
GSF06-1367

Zawsze należy stosować się do zaleceń okulisty oraz ulotek informacyjnych dołączonych do środków pielęgnacyjnych, jak również soczewek i pojemników. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu, nadmiernego łzawienia, zmian w widzeniu, zaczerwienieniu oka, należy NATYCHMIAST zdjąć soczewkę i skontaktować się z okulistą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Zawsze należy używać świeżego płynu **OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS**. Nigdy nie należy używać go ponownie do pojemników na soczewki.
- Należy używać wyłącznie pojemników na soczewki ALCON®.
- W celu uniknięcia zainfekowania płynu nie należy dotykać końcówką butelki do jakichkolwiek powierzchni.
- Zamknąć po użyciu.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać nadmiernego nagrzania.
- Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.
- Zużyć cały płyn przed upływem daty ważności. 
- Płyn zużyć w terminie do 6 miesięcy od otwarcia butelki.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować w dezynfekcji cieplnej (termicznej).

OPAKOWANIA:

Jałowy roztwór **OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS**, sterylizowany metodą filtracyjną, dostępny jest w plastikowych butelkach o pojemnościach od 60 ml do 470 ml.



Pojemnik na soczewki Alcon® (**OPCJONALNIE***)

DYSTRYBUTOR/IMPORTER: (OPCJONALNIE)

Alcon Polska Sp. z o.o.
ul. Żelazna 28/30
00-832 Warszawa

*Tekst umieszczony na ulotce w przypadku dołączania pojemnika na soczewki

WYTWÓRCA:

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas USA 76134-2099

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL W UNII EUROPEJSKIEJ:

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Boundary Way
Hemel Hempstead
Hertfordshire
HP2 7UD Wielka Brytania

Nr patentów U.S. 5,393,491; 5,573,726; 5,631,005; 6,319,464; i 6,365,636 **(OPCJONALNIE)**

Nr Patentów Europejskich 0 669 803 i 0 948 357 **(OPCJONALNIE)**

CE 0123

© 2006 Alcon, Inc.