

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist*
Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach)

{Kod językowy ISO} Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki. Ulotkę tę należy zachować, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

OPTI-FREE* PureMoist*

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny do miękkich soczewek kontaktowych, zwłaszcza silikonowo-hydrożelowych.

DZIAŁANIE:

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE PureMoist stosowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem:

- Czyści usuwając złogi lipidowe i białkowe z soczewek kontaktowych podczas ich codziennej dezynfekcji i przechowywania.
- Dwa biokompatybilne środki dezynfekujące POLYQUAD* i ALDOX* przeciwdziałają rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów (bakterii, grzybów oraz pełzaków z rodzaju *Acanthamoeba*).
- Jest używany do spłukiwania i regenerowania miękkich (hydrofilnych) soczewek kontaktowych, zwłaszcza silikonowo-hydrożelowych.
- Jest przeznaczony do przechowywania soczewek przez okres do 30 dni po ich dezynfekcji.
- Dostarcza całodzienny komfort dzięki obecności formuły nawilżającej HydraGlyde* Moisture Matrix, która zapewnia optymalne nawodnienie soczewek i sprzyja jego utrzymaniu przez cały dzień. Zachowuje nawilżającą otoczkę, ułatwiającą ślizganie się powieki po powierzchni soczewki bez wywoływania podrażnień.

Codziennie stosowanie **wielofunkcyjnego płynu dezynfekcyjnego OPTI-FREE PureMoist** nie wymaga używania oddzielnego enzymatycznego środka czyszczącego. Nie należy przechowywać soczewek kontaktowych w roztworze soli fizjologicznej zamiast w **wielofunkcyjnym płynie dezynfekcyjnym OPTI-FREE PureMoist**. Roztwór soli fizjologicznej nie dezynfekuje soczewek.

WSKAZÓWKI OGÓLNE:

- Przed użyciem zdjąć banderolę zabezpieczającą umieszczoną wokół szyjki butelki.
- Przed jakimkolwiek kontaktem z soczewkami zawsze należy dokładnie umyć i osuszyć ręce.
- Soczewki należy czyścić, odświeżać, płukać i dezynfekować po każdym ich zdjęciu.
- Soczewki (lewą i prawą) należy zawsze zakładać i zdejmować w tej samej kolejności w celu uniknięcia ich zamiany.

- Po użyciu pojemnik do przechowywania soczewek zawsze należy opróżnić i wypłukać świeżą porcją **wielofunkcyjnego płynu dezynfekcyjnego OPTI-FREE PureMoist**, a następnie pozostawić do wyschnięcia. Nie używać wody do płukania pojemnika do przechowywania soczewek.

ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZE WYNIKI, NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI CZYSZCZENIA, ODŚWIEŻANIA, DEZYNFEKCJI I USUWANIA OSADÓW BIAŁKOWYCH:

1. Dokładnie zwilżyć każdą stronę soczewki **wielofunkcyjnym płynem dezynfekcyjnym OPTI-FREE PureMoist**. Pocierać soczewkę przez 20 sekund.
2. Oplukać każdą stronę soczewki przez 10 sekund stałym strumieniem **wielofunkcyjnego płynu dezynfekcyjnego OPTI-FREE PureMoist**.
3. Napęłnić pojemnik na soczewki ALCON® świeżą porcją **wielofunkcyjnego płynu dezynfekcyjnego OPTI-FREE PureMoist**. Soczewki należy przechowywać w zamkniętym pojemniku przez całą noc lub co najmniej przez 6 godzin; po upływie tego czasu soczewki są gotowe do założenia.

Jeżeli na soczewkach pozostały jakiegokolwiek zanieczyszczenia, przed ponownym ich założeniem należy je oplukać **wielofunkcyjnym płynem dezynfekcyjnym OPTI-FREE PureMoist**.

Soczewki można pozostawić w nieotwieranym pojemniku zawierającym **wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE PureMoist** przez okres do 30 dni. Po tym czasie soczewki przed użyciem muszą zostać ponownie oczyszczone i zdezynfekowane **wielofunkcyjnym płynem dezynfekcyjnym OPTI-FREE PureMoist**.

Zawsze należy stosować się do zaleceń specjalisty. Nie należy zmieniać sposobu postępowania z soczewkami ani płynu do pielęgnacji bez uprzedniej konsultacji ze specjalistą.

OPIS:

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE PureMoist to jałowy zbuforowany roztwór wodny zawierający cytrynian sodu, chlorek sodu, kwas borowy, sorbitol, aminometylopropan, wersenian dwusodowy, dwie substancje nawilżające (TETRONIC 1304[†] oraz formułę nawilżającą HydraGlyde Moisture Matrix [EOBO-41 – polioksyetylen-polioksybutylen]) oraz środki konserwujące POLYQUAD (polikwaternium-1) 0,001% i ALDOX (miristamidopropylodimetyloaminę) 0,0006%. Formuła nawilżająca HydraGlyde Moisture Matrix jest opatentowanym wielofunkcyjnym kopolimerem blokowym, który został opracowany głównie jako środek nawadniający i nawilżający do silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych.

[†]TETRONIC[®] jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BASF.

WSKAZANIA (Zastosowanie):

Do stosowania w celu codziennego czyszczenia, odświeżania, opłukiwania, usuwania osadów białkowych, dezynfekcji chemicznej (nie termicznej) oraz przechowywania wszystkich rodzajów miękkich (hydrofilnych) soczewek kontaktowych, zwłaszcza silikonowo-hydrożelowych, zgodnie z zaleceniami specjalisty.

PRZECIWSKAZANIA (Powody, aby nie stosować):


Osoby uczulone na którykolwiek składnik preparatu nie powinny go stosować.

OSTRZEŻENIA:

Konieczne jest przestrzeganie zaleceń specjalisty oraz wszystkich instrukcji dla soczewek kontaktowych, dotyczących prawidłowego użytkowania i pielęgnacji soczewek oraz produktów do ich pielęgnacji, z pojemnikiem na soczewki włącznie. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu, nadmiernego łzawienia, zmian widzenia lub zaczerwienienia oka należy NATYCHMIAST zdjąć soczewkę i skontaktować się ze specjalistą, ponieważ problem może ulec nasileniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Zawsze używaj świeżej porcji **wielofunkcyjnego płynu dezynfekcyjnego OPTI-FREE PureMoist**. Nigdy nie używaj roztworu znajdującego się w pojemniku do przechowywania soczewek ponownie.
- ZABEZPIECZENIE PRZED OTWARCIEM: Nie używaj, jeśli banderola zabezpieczająca jest uszkodzona albo jej brak, lub jeśli brak nakładki zabezpieczającej. 
- Nie dopuszczaj do kontaktu końcówki butelki z jakąkolwiek powierzchnią, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie płynu.
- Zamykaj butelkę po każdym użyciu.
- Nie przechowuj w temperaturze poniżej 15°C ani w temperaturze powyżej 30°C.

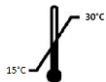

- Przechowuj butelkę szczelnie zamkniętą.
- Zużyj przed upływem daty ważności oznaczonej na opakowaniu. 
- Po upływie sześciu miesięcy od momentu pierwszego otwarcia opakowania cały

pozostały płyn należy usunąć. 

- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosuj do dezynfekcji cieplnej (termicznej).



SPOSÓB DOSTARCZANIA:

OPTI-FREE[®] PureMoist[®] MPDS (Trade) FID 114675A
CE_cSLT Package Insert/Cartron/Bottle Label

Updated: July 2015
Catalyst Labeling Asset: 66045

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE PureMoist, sterylizowany poprzez filtrację, dostarczany jest w plastikowych butelkach o pojemności od 60 ml do 480 ml. Na butelce oraz na kartonowym opakowaniu zewnętrznym podano numer serii oraz datę ważności.



Pojemnik do przechowywania soczewek kontaktowych ALCON[®] (OPTIONAL)



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

a Novartis company



AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL W UNII EUROPEJSKIEJ

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
GU16 7SR, Surrey
Wielka Brytania

DYSTRYBUTOR

Alcon Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa



© XXXX Novartis

*znak towarowy firmy Novartis

