

Krople nawilżające do oczu OPTI-FREE* PRO*

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Krople nawilżające do oczu OPTI-FREE* PRO*

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania. Instrukcję należy zachować, aby w razie potrzeby móc ją przeczytać ponownie.

OPIS:

Krople nawilżające do oczu OPTI-FREE PRO to specjalistyczny produkt o właściwościach nawilżających zawierający polimery i lipidy, które działając wspólnie pomagają uzupełnić nawilżenie w wewnętrznej i zewnętrznej warstwie filmu łzowego. **Krople nawilżające do oczu OPTI-FREE PRO** stanowią unikalne połączenie związków powierzchniowo czynnych i substancji oleistych, które tworzą barierę ochronną w obrębie zewnętrznej warstwy filmu łzowego, co pozwala utrzymać prawidłowy poziom nawilżenia powierzchni gałki ocznej.

Krople nawilżające do oczu OPTI-FREE PRO przed aplikacją mają postać emulsji o naturalnym białym zabarwieniu.

Krople nawilżające do oczu OPTI-FREE PRO to produkt sterylny zawierający glikol propylenowy, hydroksypropyloguar, olej mineralny, dimirystoilofosfatydyloglicerol, stearynian polioksylu (40), tristearynian sorbitanu, kwas borowy, sorbitol, wersenian disodowy oraz środek konserwujący POLYQUAD* (polikwaternium-1) 0,001% i wodę oczyszczoną. Produkt może zawierać kwas chlorowodorowy i/lub wodorotlenek sodu w celu dostosowania pH.

ZASTOSOWANIE (wskazania do stosowania):

Krople nawilżające do oczu OPTI-FREE PRO należy stosować przed założeniem soczewek kontaktowych i/lub po ich zdjęciu w celu przywrócenia i utrzymania naturalnego nawilżenia powierzchni gałki ocznej, łagodzenia objawów suchości oka oraz zapobiegania dalszym podrażnieniom.

PRZECIWWSKAZANIA (powody, aby nie stosować):

Alergia na którykolwiek składnik kropli nawilżających do oczu OPTI-FREE PRO.

SPOSÓB UŻYCIA:

Krople nawilżające do oczu OPTI-FREE PRO należy stosować w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu nawilżenia powierzchni gałki ocznej, łagodzenia objawów suchości oka oraz zapobiegania dalszym podrażnieniom.

- Przed użyciem dokładnie wstrząśnij.
- Krople zakropl (lub zaaplikuj) przed założeniem soczewek kontaktowych i/lub po ich zdjęciu.
- Zakropl (lub zaaplikuj) według potrzeb 1-2 krople do oka/oczu.

OSTRZEŻENIA:

- Ważne jest, aby postępować zgodnie z zaleceniami specjalisty i wszystkimi instrukcjami dołączonymi do opakowania dotyczącymi prawidłowego stosowania produktu.

- W przypadku odczuwania uporczywego bólu, nadmiernego łzawienia, zmian widzenia, zaczerwienia lub podrażnienia oka lub jeśli dolegliwości pogłębiają się albo utrzymują przez więcej niż 72 godziny, przerwij stosowanie produktu i niezwłocznie skontaktuj się ze specjalistą; zignorowanie wymienionych objawów może skutkować rozwojem poważnych problemów.
- Nie używaj, jeśli kolor produktu uległ zmianie
- Nie dopuszczaj do kontaktu końcówki pojemnika z jakąkolwiek powierzchnią, ponieważ może to skutkować zanieczyszczeniem produktu.
- Przed zastosowaniem konieczne zdejmij soczewki kontaktowe.
- Po użyciu szczelnie zamknij pojemnik.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
- W przypadku połknięcia produktu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

OSTRZEŻENIA:

- Przechowuj w temperaturze pokojowej. 
- Przechowuj w szczelnie zamkniętym pojemniku.
- Nie stosuj po upływie daty ważności oznaczonej na pojemniku. 
- Usunąć cały nieużyty produkt po upływie sześciu miesięcy od momentu pierwszego otwarcia pojemnika. 
- ZABEZPIECZENIE PRZED NIEUPRAWNIONYM OTWARCIEM: Nie używaj, jeśli folia zabezpieczająca została uszkodzona lub jej brak, lub gdy zerwane zostało zabezpieczenie nakrętki. Nie stosuj, jeśli opakowanie było otwierane lub jest uszkodzone. 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

Krople nawilżające do oczu OPTI-FREE* PRO* są dostępne w opakowaniu o pojemności od 3 ml do 10 ml. Nie wszystkie pojemności mogą być dostępne w sprzedaży.



DYSTRYBUTOR:

Alcon Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa



WYTWÓRCA:

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099



Alcon Laboratories (UK) Ltd.

Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR,
Wielka Brytania



© 2014 Novartis

*znak towarowy firmy Novartis