

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Krople nawilżające do soczewek OPTI-FREE* PRO*

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania. Instrukcję należy zachować, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

SKŁAD:

Krople nawilżające do soczewek OPTI-FREE PRO to jałowy roztwór wodny zawierający glikol polietylenowy 400, glikol propylenowy, hydroksypropyloguar, sorbitol, aminomethyl propanol, kwas borowy, chlorek potasu, chlorek sodu oraz środek konserwujący POLYQUAD* (polikwaternium-1) 0,001% i wodę oczyszczoną. Roztwór może zawierać kwas chlorowodorowy i/lub wodorotlenek sodu w celu dostosowania pH.

ZASTOSOWANIE (wskazania do stosowania):

Krople nawilżające do soczewek OPTI-FREE PRO to jałowy zbuforowany roztwór wodny przeznaczony do stosowania jako krople nawilżające do wszystkich typów miękkich soczewek kontaktowych silikonowo- hydrożelowych i hydrożelowych.

- Krople mogą być stosowane do nawilżania, uwodnienia i lubrykacji soczewki w trakcie jej noszenia.
- Krople mogą być także stosowane w celu otulenia soczewki warstwą nawilżającą poprzez zaaplikowanie kropli do zagłębienia soczewki przed jej założeniem na oko.

PRZECIWWSKAZANIA (powody, aby nie stosować):

Alergia na którykolwiek składnik **kropli nawilżających do soczewek OPTI-FREE PRO**.

SPOSÓB UŻYCIA:

- Przed użyciem dokładnie wstrząśnij.
- Zakropl według potrzeb 1-2 krople **kropli nawilżających do soczewek OPTI-FREE PRO** do oka w trakcie noszenia soczewki w celu nawilżania, uwodnienia i lubrykacji wszystkich typów miękkich soczewek kontaktowych silikonowo- hydrożelowych i hydrożelowych. Po zakropleniu mrugnij 2-3 razy.
- Możesz również użyć przed założeniem soczewki poprzez zaaplikowanie 1-2 kropli do jej zagłębienia.

OSTRZEŻENIA:

- Aby uniknąć zakażenia, końcówką zakraplacza butelki nigdy nie dotykaj żadnej powierzchni.
- Nie przelewaj zawartości butelki do innych pojemników.
- Nie używaj, jeśli kolor roztworu uległ zmianie.
- STOSOWANIE SOCZEWEK KONTAKTOWYCH I PREPARATÓW DO ICH PIELĘGNACJI MOŻE SKUTKOWAĆ POWAŻNYM USZKODZENIEM OCZU. Ważne jest, aby postępować zgodnie z zaleceniami specjalisty i wszystkimi instrukcjami na opakowaniu dotyczącymi prawidłowego stosowania soczewek kontaktowych oraz preparatów do ich pielęgnacji, w tym pojemnika do przechowywania soczewek. Poważne powikłania, takie jak owrzodzenie rogówki, mogą rozwijać się bardzo szybko i skutkować trwałym spadkiem ostrości wzroku.
- Jeżeli doświadczasz dyskomfortu oka, nadmiernego łzawienia, zmian w widzeniu lub zaczerwienienia oka to przerwij stosowanie produktu i skonsultuj się z okulistą, ponieważ objawy te mogą się nasilić.

- Przechowuj ten i wszystkie inne środki medyczne w miejscu niedostępnym dla dzieci.



- W przypadku połknięcia produktu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Przed jakimkolwiek kontaktem z soczewkami zawsze dokładnie umyj i osusz ręce.
- Po użyciu szczelnie zamknij butelkę.
- Produkt przechowuj w szczelnie zamkniętej butelce.



- Nie przechowuj w temperaturze powyżej 30°C.
- Nie używaj po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu.
- Usuń cały nieużyty roztwór po upływie sześciu miesięcy od momentu pierwszego



otwarcia butelki.  6M

- ZABEZPIECZENIE PRZED NIEUPRAWNIONYM OTWARCIEM: Nie używaj, jeśli folia zabezpieczająca została uszkodzona lub jej brak, lub gdy zerwane zostało zabezpieczenie nakrętki. Nie stosuj, jeśli opakowanie było otwierane lub jest

uszkodzone. 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub dolegliwości związanych z noszeniem soczewek, soczewki należy natychmiast wyjąć i bezzwłocznie skontaktować się ze specjalistą. (Patrz: *Ostrzeżenia*).

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

Krople nawilżające do soczewek OPTI-FREE PRO są dostępne w butelkach o pojemności od 3 ml do 10 ml (także ich wielokrotności). Nie wszystkie pojemności mogą być dostępne w sprzedaży.



DYSTRYBUTOR:

Alcon Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa



WYTWÓRCA

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099



Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU 16 7SR
Wielka Brytania



© 2015 Novartis
*znak towarowy firmy Novartis