

OPTI-FREE® RepleniSH® wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny
ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach

Prosimy o uważne przeczytanie i pozostawienie poniższej ulotki.

OPTI-FREE® RepleniSH® wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny

Zwiększa wygodę noszenia soczewek
i regeneruje powierzchnię soczewki w celu utrzymania nawilżenia

Bez pocierania

Czyści, regeneruje, spłukuje, dezynfekuje, przechowuje

Do wszystkich miękkich soczewek kontaktowych, również silikonowo-hydrożelowych.

OPIS:

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE® RepleniSH® to jałowy, zbuforowany, izotoniczny roztwór wodny zawierający cytrynian sodu, chlorek sodu, boran sodu, glikol propylenowy, TEARGLYDE® opatentowany system regenerujący o podwójnym działaniu (TETRONIC® 1304[†], kwas nonanoiloetylenodiaminotrioctowy) oraz środki konserwujące POLYQUAD® (polikwaternium-1) 0,001% i ALDOX® (miristamidopropylodimetyloamina) 0,0005%.

[†]TETRONIC® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BASF.

DZIAŁANIE:

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE® RepleniSH® stosowany zgodnie z zaleceniami:

- Czyści rozluźniając i usuwając osady białkowe oraz inne złoże i zanieczyszczenia z soczewek podczas dezynfekcji i przechowywania.
- Niszczy szkodliwe mikroorganizmy (zarazki) na powierzchniach soczewek.
- Służy do spłukiwania i przechowywania wszystkich rodzajów miękkich (hydrofilowych) soczewek kontaktowych, również silikonowo-hydrożelowych.
- Jego formuła pozwala na dezynfekcję i przechowywanie soczewek przez okres do 30 dni po dezynfekcji.

Jeżeli **wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE® RepleniSH®** używany jest codziennie, nie ma potrzeby stosowania oddzielnego enzymatycznego środka czyszczącego.

Nie jest potrzebne stosowanie roztworu soli fizjologicznej z **wielofunkcyjnym płynem dezynfekcyjnym OPTI-FREE® RepleniSH®**.

WSKAZANIA (Zastosowanie)

Do stosowania podczas codziennego czyszczenia, kondycjonowania, spłukiwania, usuwania osadów białkowych, dezynfekcji chemicznej (nie cieplnej) i przechowywania wszystkich rodzajów miękkich (hydrofilowych) soczewek kontaktowych, również

silikonowo-hydrożelowych zgodnie z zaleceniami specjalisty.

KOMFORT I NAWILŻENIE UŁATWIAJACE NOSZENIE SOCZEWEK

Kiedy soczewki są zanurzone w **wielofunkcyjnym płynie dezynfekcyjnym OPTI-FREE® RepleniSH®** w trakcie ich codziennego przechowywania w pojemniku na soczewki, płyn regeneruje powierzchnię soczewki przez adsorpcję opatentowanego systemu nawilżającego, umożliwiającego utrzymanie przez cały dzień na powierzchni soczewki cienkiej warstwy wilgoci pochodzącej z naturalnych łez. Pozwala to na ciągłe utrzymanie warstwy wilgoci pomiędzy soczewką i powierzchnią oka, co zapewnia komfort przez cały dzień dzięki zachowaniu nawilżenia soczewek. Ta ochronna warstwa wilgoci na powierzchni soczewki pomaga wielu pacjentom zachować prawidłowy wygląd oczu (bez zaczerwienienia).

Zwiększa wygodę noszenia soczewek kontaktowych wykonanych z najczęściej stosowanych materiałów u użytkowników, u których występował dyskomfort.

Regeneruje soczewki w celu utrzymania wilgoci na powierzchni, co pozwala wielu pacjentom na wyraźniejsze widzenie pod koniec dnia.

PRZECIWWSKAZANIA (Powody, aby nie używać):

Osoby uczulone na jakikolwiek składnik **wielofunkcyjnego płynu dezynfekcyjnego OPTI-FREE® RepleniSH®** nie powinny go używać.

WSKAZÓWKI OGÓLNE:

- Przed użyciem zdjąć banderolę z nadrukiem umieszczoną wokół szyjki butelki.
- Przed dotykiem soczewek zawsze należy umyć i opłukać ręce.
- Soczewki należy czyścić, regenerować, płukać i dezynfekować za każdym razem, kiedy są zdejmowane.
- Soczewki (lewą i prawą) należy nakładać i zdejmować zawsze w tej samej kolejności w celu uniknięcia ich zamiany.
- Po użyciu pojemnik na soczewki zawsze należy opróżnić i wypłukać świeżym płynem **OPTI-FREE® RepleniSH® Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny** i pozwolić na jego wyschnięcie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA, REGENERACJI, DEZYNFEKCJI I

USUWANIA OSADÓW BIAŁKOWYCH:

- Dokładnie opłukać każdą stronę soczewki (przez 5 sekund) **wielofunkcyjnym płynem dezynfekcyjnym OPTI-FREE® RepleniSH®**.
- Napełnić pojemnik do przechowywania soczewek ALCON® świeżym **wielofunkcyjnym płynem dezynfekcyjnym OPTI-FREE® RepleniSH®**. Przechowywać soczewki w zamkniętym pojemniku przez całą noc lub co najmniej przez 6 godzin. Po namoczeniu soczewki są gotowe do nałożenia.

Jeżeli na soczewkach pozostały jakiekolwiek zanieczyszczenia, należy je opłukać **wielofunkcyjnym płynem dezynfekcyjnym OPTI-FREE® RepleniSH®** przed ponownym nałożeniem. Soczewki można pozostawić w zamkniętym pojemniku zawierającym **wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE® RepleniSH®** przez okres do 30 dni. Po tym czasie soczewki muszą zostać ponownie oczyszczone i

zdezynfekowane **wielofunkcyjnym płynem dezynfekcyjnym**
OPTI-FREE® RepleniSH® zawsze co 30 dni i przed użyciem.

Oczy każdego człowieka są inne. Specjalista może zalecić stosowanie dodatkowych wyrobów lub zabiegów pielęgnacyjnych, w zależności od indywidualnego składu filmu łzowego lub sposobu noszenia soczewek. Zawsze należy stosować się do zaleceń okulisty. Nie należy zmieniać zaleceń dotyczących pielęgnacji soczewek bez skonsultowania się ze specjalistą.

Jeżeli specjalista zaleci pocieranie soczewek, należy umieścić kilka kropli płynu na soczewce i pocierać przez kilka sekund. Następnie postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną powyżej.

OSTRZEŻENIA:

Niezbędne jest przestrzeganie zaleceń specjalisty oraz wszystkich instrukcji dołączonych do opakowania, dotyczących prawidłowego użytkowania i dbałości o soczewki oraz inne produkty związane z pielęgnacją soczewek, włącznie z pojemnikiem na soczewki. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu, nadmiernego łzawienia, zmian widzenia lub zaczerwienienia oka należy NATYCHMIAST zdjąć soczewkę i skontaktować się z lekarzem, ponieważ problem może ulec nasileniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Zawsze należy używać świeżego **wielofunkcyjnego płynu dezynfekcyjnego OPTI-FREE® RepleniSH®**. Nigdy nie należy używać ponownie roztworu znajdującego się w pojemniku do przechowywania soczewek.
- W celu uniknięcia zakażenia płynu nie należy nigdy dotykać końcówką butelki do jakichkolwiek powierzchni.
- Zamknąć nakrywką po użyciu.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Przechowywać w pozycji pionowej.
- Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, kiedy nie jest używana.
- Zużyć przed upływem daty ważności oznaczonej na opakowaniu. 
- Płyn pozostały po upływie sześciu miesięcy od pierwszego otwarcia butelki należy usunąć.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować do dezynfekcji cieplnej (termicznej).

OPAKOWANIA:

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE® RepleniSH®, który jest wyłławiany metodą filtracyjną, dostarczany jest w plastikowych butelkach o pojemności od 60 ml do 470 ml.



Pojemnik do przechowywania soczewek ALCON® (**OPCJONALNIE**)

WYTWÓRCA:

OPTI-FREE RepleniSH MPDS
Insert, Carton, Bottle
Poland

Page 3 of 5

Updated: May 8, 2006
GSF 06-0748

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL W UNII EUROPEJSKIEJ:

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Boundary Way
Hemel Hempstead
Hertfordshire
HP2 7UD Wielka Brytania

DYSTRYBUTOR/IMPORTER:

Alcon Polska Sp. z o.o.
ul. Żelazna 28/30
00-832 Warszawa

Numery patentów w USA: 5,393,491; 5,573,726; 5,631,005; 6,143,799; 6,365,636;
6,503,497 i 6,995,123



© 2008, 2009 Alcon, Inc.

